



Die Lösung zur Prävention von Schrittmacher-Kontamination

Antimikrobieller Schutz für kardiale elektronische Implantate

TauroPace™ ist eine antimikrobielle Lösung, die CIEDs („cardiac implantable electronic devices“) vor der Implantation steril hält. Sie ist für die Anwendung auf CIED-Oberflächen zertifiziert. Dank des zusätzlichen Wirkstoffs Taurolidin reduziert **TauroPace™** die Kontamination durch Bakterien und Pilze.

3 Fakten über Taurolidin



Taurolidin ist gegen mehr als 500 Arten von Bakterien und Pilzen wirksam.¹



Taurolidin wird schnell zu Taurin, Kohlendioxid und Wasser abgebaut.



Taurolidin ist kein Antibiotikum und daher unbedenklich hinsichtlich Antibiotikaresistenz.

Sicherheit und Wirksamkeit

Die Sicherheit und Wirksamkeit von **TauroPace™** wurde im europäische Zertifizierungsverfahren für Medizinprodukte bestätigt und ist durch das CE-Zeichen gekennzeichnet.


Fazit

Die Kontamination von CIEDs stellt eine zunehmend ernsthafte Bedrohung dar, weil immer komplexere Systeme bei Patienten mit mehreren Begleiterkrankungen implantiert werden. **Die Prävention einer CIED-Kontamination vor der Implantation ist entscheidend, da Kontaminationen wesentlich zu CIED-Infektionen beitragen.**²



Anwendung von TauroPace™

Wischen Sie alle Komponenten der kardialen elektronischen Implantate vor der Implantation mit **TauroPace™** ab. Gehen Sie wie in der Gebrauchsanweisung beschrieben vor.

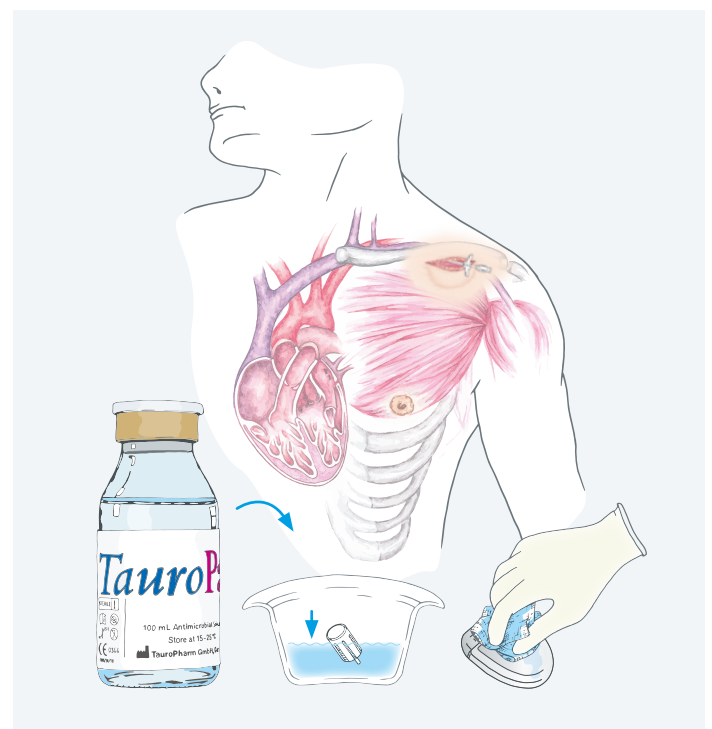

¹ Torres-Viera et al. *Antimicrob Agents Chemother* 2000. DOI: 10.1128/AAC.44.6.1720-1724.2000

² Blomström-Lundqvist et al. *Eur Heart J* 2020. DOI: 10.1093/eurheartj/ehaa010

Behandlung von CIED-Hardware

Schritt-für-Schritt-Anleitung




Schritt 1

Geben Sie **TauroPace™** in ein steriles Einmalgefäß.



Schritt 2

Wischen Sie die Schrittmachersonde mit **TauroPace™** ab und mobilisieren Sie die Fixierhülse. Wiederholen Sie diesen Vorgang für jede Sonde vor der endgültigen Platzierung.

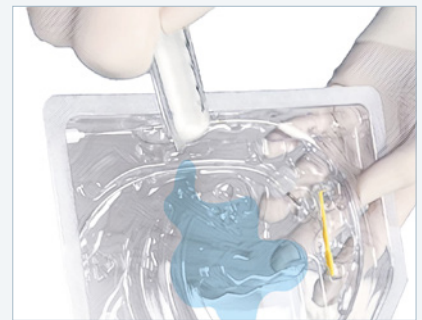

Schritt 3

Wischen Sie den Generator vor der endgültigen Platzierung mit **TauroPace™** ab.



Prävention ist besser als Behandlung.

Diese Informationen ersetzen nicht die Gebrauchsanweisung des Herstellers.



Hersteller



TauroPharm GmbH
August-Bebel-Straße 51
D-97297 Waldbüttelbrunn

Tel. +49 931 30 42 99 0
Fax +49 931 30 42 99 29

Vertrieb

Mehr Informationen auf tauropace.com